

las medidas que debe tener en cuenta el personal que trabaja en la elaboración de los elementos de protección descartables destinados al personal de salud.

Cabe aclarar, que para la preparación de los mismos es necesario un ambiente ordenado, limpio, desinfectado y controlado ya que la materia prima se encuentra en contacto con las superficies.


A continuación se realizan las siguientes indicaciones:

En cuanto al personal


- ✓ Buen estado de salud (sin procesos respiratorios, asma, alergias)
- ✓ Esquema de vacunación completo
- ✓ Sin heridas o lastimaduras en sus manos
- ✓ Sin infecciones en piel y/o uñas
- ✓ Usar cofia descartable, cabello bien recogido en mujeres o corto en varones. De usar cofias de tela, las mismas deben lavarse a diario de modo de usar una limpia y seca cada día)
- ✓ Hombres sin barba


CONTROL DE INFECCIONES-SERVICIO DE INFECTOLOGIA

- ✓ Barbijo quirúrgico tricapa, correctamente colocado

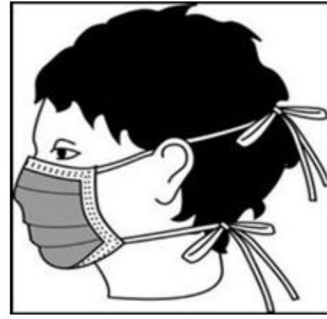

- ✓ Practicar **higiene de manos con agua y jabón** al iniciar la jornada laboral y posterior al uso de sanitarios. En el transcurso del día laboral puede realizar higiene de manos con alcohol en gel o soluciones alcohólica para manos
- ✓ No debe consumir alimentos mientras trabaja
- ✓ No debe manipular el celular y si lo hace debe practicar higiene de manos
- ✓ No es necesario el uso de guantes

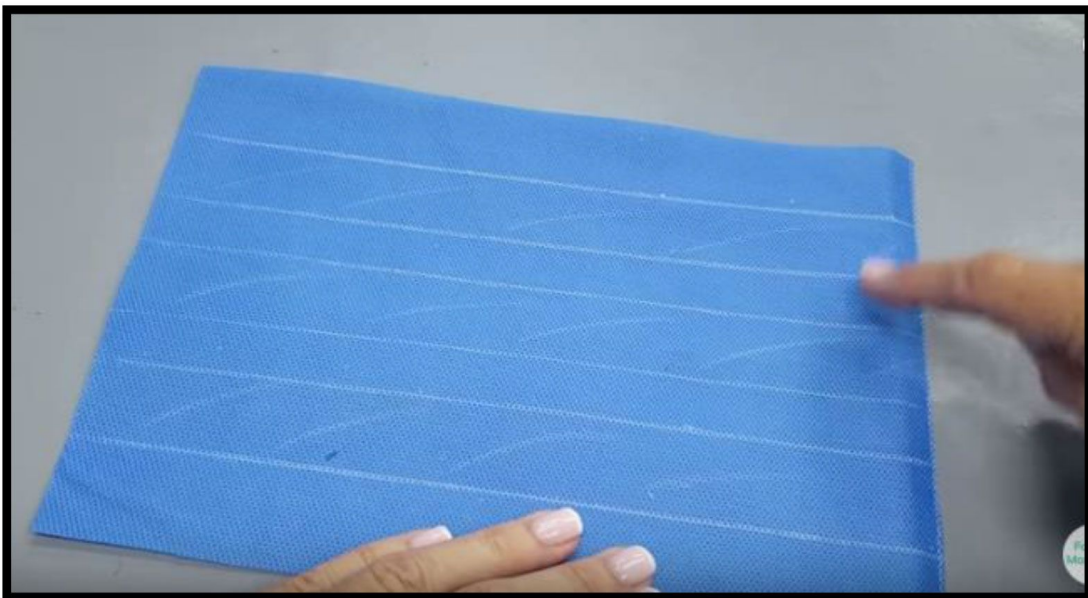

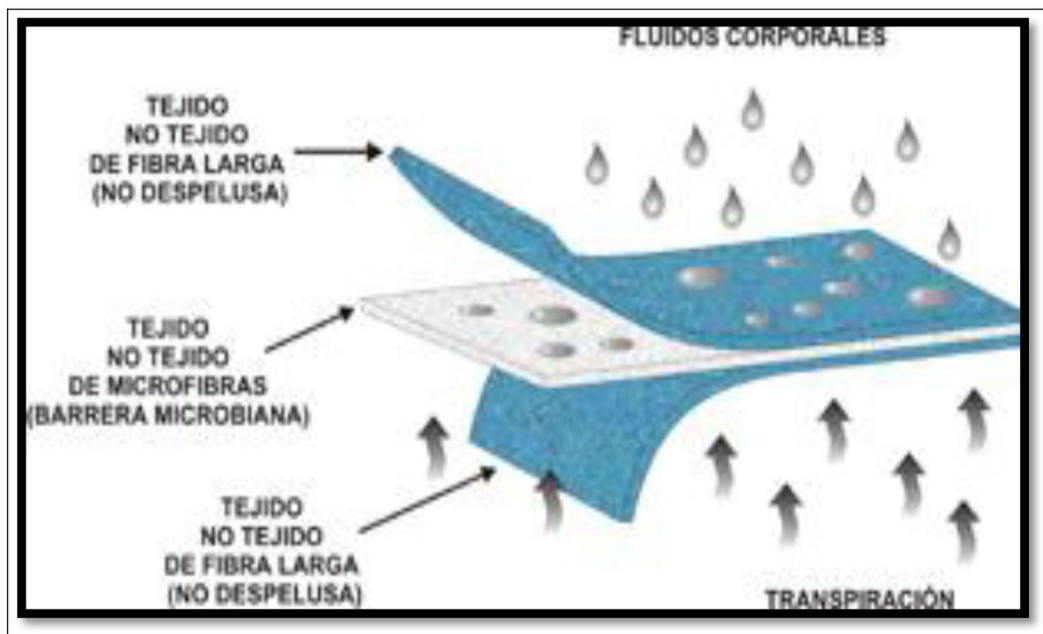

En cuanto al lugar de trabajo

- ✓ Mesa exclusiva para esta tarea, con superficies lisas, no porosas, sin roturas, íntegras
- ✓ Máquina de coser, tijera, limpia y desinfectada (se puede utilizar alcohol 70°)
- ✓ Toda la materia prima debe resguardarse en lugares limpios y secos
- ✓ La materia prima no debe permanecer en el piso bajo ninguna circunstancia

En cuanto al material que se fabrica

Barbijos:

- ✓ De triple capa con filtro intermedio antibacteriano, tableado
- ✓ Gramaje mínimo de la capa intermedia (antibacterial): 18 gramos
- ✓ Gramaje mínimo de las capas internas y externas: 25 gramos
- ✓ Cinta Hilera: forma el borde del barbijo, sellando las capas, con doble costura
- ✓ Las cintas laterales debe ser continuas, cerradas a las tiras superior e inferior, sobresaliendo 50cm de los bordes.


CONTROL DE INFECCIONES-SERVICIO DE INFECTOLOGIA

- ✓ Estarán cosidas a máquina a 0.2 cm. del borde de unión
- ✓ Pieza metálica de ajuste nasal:
 - Aluminio o material similar (inoxidable, maleable y resistente) revestida en material suave (plástico)
 - Se colocará en el centro del borde superior del barbijo, cubierto por la cinta hilera
 - Dimensiones: 0.1 cm de espesor, 0.4 cm de ancho y 10 cm de largo.


✓ Tabla de talles y medidas

Tamaño	Largo	Ancho
Adultos	18 a 22	9.5 a 11
Niños	14.5	8.5

- ✓ Confección
 - Después de tomar las medidas, debe coser las tres capas en forma prolija y libre de fallas en sus costuras y terminaciones
 - Tener en cuenta al realizar la confección que la pieza metálica o de aluminio que servirá para el ajuste nasal quede en la parte superior del tableado, para favorecer la correcta colocación en forma descendente

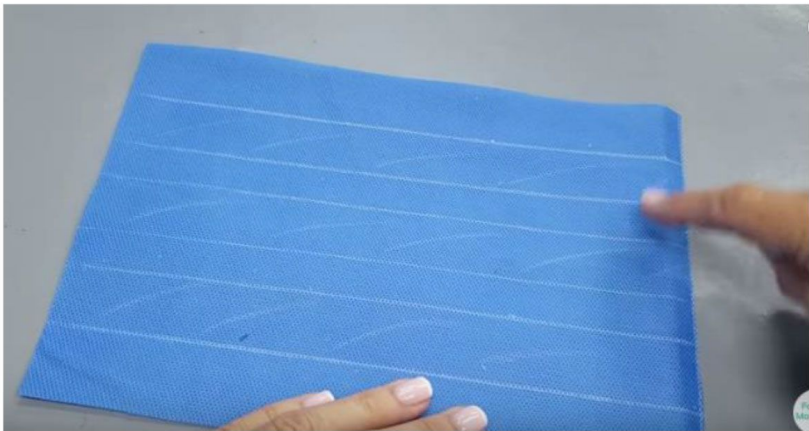

9.5 a 11

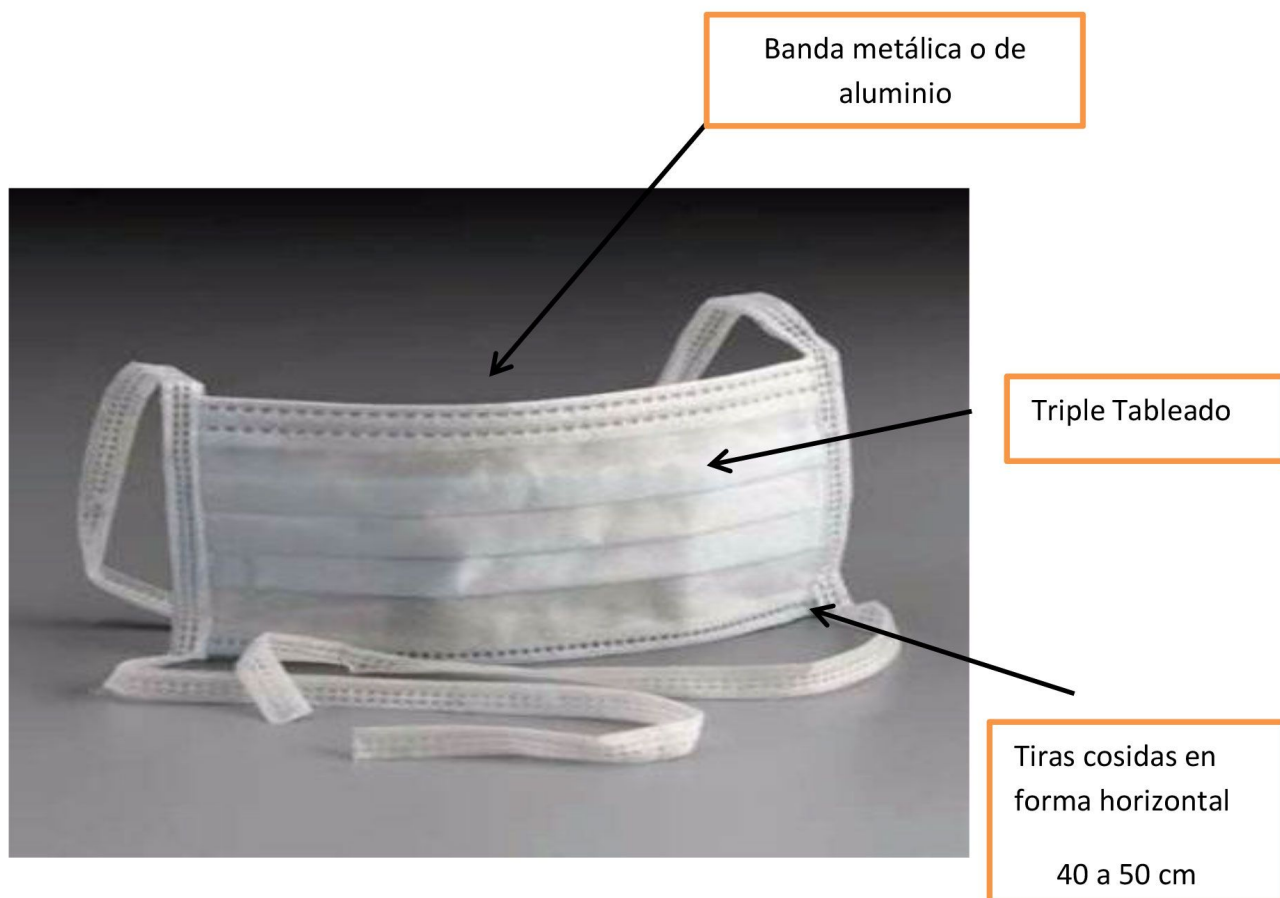

Camisolín:


- ✓ Debe ser de material de tela fliselina también conocida como no-tejido (Spunbond)
- ✓ Confeccionada con mangas largas con puños elásticos y/o puños tejidos
- ✓ Los camisolines de uso rutinario deben ser de 60 gramos y de 80 gramos sin son los hidro hemo repelentes o impermeables
- ✓ El largo recomendado es por debajo de las rodillas del operador
- ✓ Las tiras deben ser a la altura del cuello y de la cintura. Se recomienda la sujeción hacia un costado (forma envolvente)
- ✓ La terminación de los camisolines debe ser prolija y libre de fallas.
- ✓ Las medidas serán de acuerdo a los talles
- ✓ El cuello será una pestaña, doble, de la misma tela del delantero, de 2cm de ancho, tomando el delantero y la espalda, abierto atrás. Estará cosido a máquina a 0.2 cm del borde de unión. En cada extremo

CONTROL DE INFECCIONES-SERVICIO DE INFECTOLOGIA


continuará la pestaña, como cinta hilera de 30 cm de largo.

- ✓ La espalda será lisa en dos piezas, abierta desde arriba hasta abajo, formando parte de las mangas ranglan y del cuello redondo; terminada en dobladillo de 4 cm, hacia adentro cocido a máquina.


Talle	Largo - cm	
46 - S	108	117
48 - M		
52 - L		
54 - XL		
56 - XXL		
Tolerancia	± 1	± 1

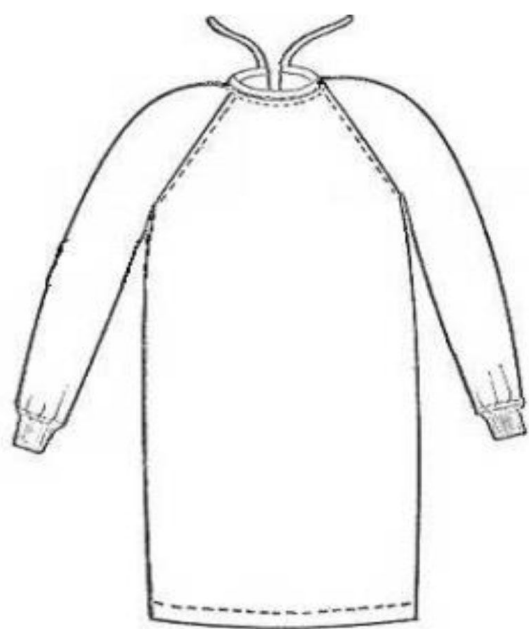

FRENTE

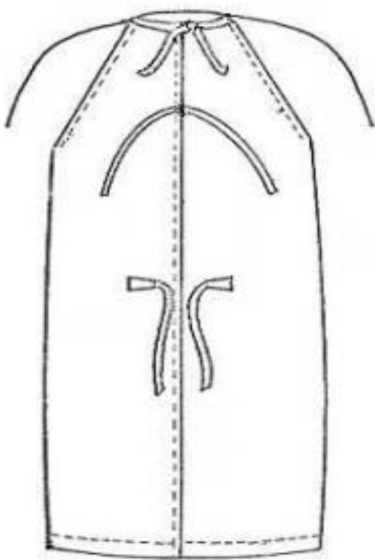

PARTE POSTERIOR

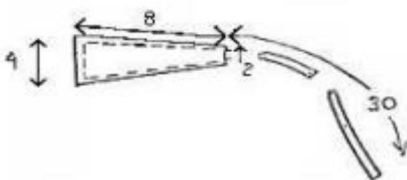

DETALLE DEL CINTURON



Gorro:

- ✓ Debe ser elaborado con el mismo material del camisolín
- ✓ Doble elástico ribeteado en su contorno
- ✓ Las medidas varían de 55 a 60 cm.



En cuanto al empaquetado

- ✓ Una vez finalizado la elaboración de los elementos de protección personal, se deben colocar en bolsas limpias de nylon
- ✓ Rotular con datos de fabricación y características
- ✓ Almacenado en armarios cerrados exclusivos para estos elementos

En cuanto a la limpieza del lugar de trabajo

- ✓ Limpiar la superficies con agua y detergente
- ✓ Enjuagar el paño con agua limpia para retirar restos de detergentes
- ✓ Secar con paño seco

En cuanto a la desinfección del lugar de trabajo

- ✓ Preparar una dilución con 20 cm de lavandina en 1 litro de agua y colocarlo en un frasco pulverizador para su práctico uso
- ✓ Esta preparación dura 24 hs. y sirve para desinfectar todas las superficies que estarán en contacto con las telas
- ✓ Pulverizar y dejar actuar 10 minutos
- ✓ Pasar un paño, dejar secar